

泡状

次亜塩素酸ナトリウム製剤

環境・器具・物品用除菌洗淨剤

次亜塩素酸Naフォーム

血液・吐物の汚れに



医療施設用

480mL

塩素系

危険

まぜるな



酸性タイプ
と併用不可



子供に注意



目に注意



保護メガネ
手袋着用



必ず換気

- **アルコール製剤**や**酸性タイプ**の製品と一緒に使う(まぜる)と有害な塩素ガスが出て**危険**。
- 液が目に入ったら、すぐ水で洗う。
- 子供の手にふれないようにする。
- 必ず換気をよくして使用する。

Ⓜ 丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2



4 987211 565015

必ず使用前に 表示をよくお読み下さい。

本品は医薬品ではありません。

**体調がすぐれない方や、心臓病・呼吸器
疾患等の方は使用しないで下さい。**

【品名】 医療施設用除菌洗浄剤

【成分】 次亜塩素酸ナトリウム(0.1～0.5%)、界面活性剤(アルキルジフェニルエーテルジスルホン酸ナトリウム)、水酸化ナトリウム(1%)、安定化剤

【液性】 アルカリ性

【用途】 医療施設等の環境表面・器具・物品(トイレの手すりや便座、床等)の除菌・洗浄

【使用方法】 ① スプレーノズルのレバーを回して「泡」を△印に合わせて下さい。② 約10cm離して対象物に直接スプレーするか、もしくは布等にスプレーして清拭した後、必ずしっかり拭き取るか流水で洗い流して下さい。③ 使用後はスプレーノズルのレバーを回して「閉」を△印に合わせて下さい。

<使用量の目安> 20平方センチメートル当たり1回スプレー(0.8mL)

【使用上の注意】 ① 用途以外に使用しないで下さい。② 使用時に必ず保護メガネ、ゴム手袋等を着用し、換気の良い場所で使用して下さい。③ 1度に大量に使用したり、続けて長時間使用しないで下さい。④ 酸性の洗浄・漂白剤、アルコール製剤、シアヌール酸系の製品等と混合(併用)すると有害な塩素ガスが発生して危険ですので避けて下さい。⑤ 人体には使用しないで下さい。⑥ 本剤は希釈せず、原液のまま使用して下さい。⑦ 肩より高い位置で使用しないで下さい。⑧ ワックスを塗布した床面には、ワックスがはがれるので使用しないで下さい。⑨ 合成ゴム製品、合成樹脂製品、金属製品等、材質によっては変質(変色)するおそれがあるので注意して下さい。⑩ 衣類、敷物、家具等につくと脱色(変色)することがあるので注意して下さい。⑪ 医療機器に使用した場合、故障の原因になることがあるので注意して下さい。⑫ 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。また、保管の際は横倒しにしないで下さい。⑬ 他の容器に入れ替えないで下さい。また、他の薬剤や除菌洗浄剤を入れないで下さい。⑭ 小児の手の届かない所に保管して下さい。⑮ 使用期限の過ぎた製品は使用しないで下さい。

【応急処置】 ① **目に入った場合は、失明のおそれがあるので、こすらずに直ちに流水で15分以上洗い流し、痛みや異常がなくても速やかに必ず眼科医の診療を受けて下さい。** ② **万一、有害な塩素ガスを吸い込んだ場合は、直ちに患者を風通しのない場所へ避難させ、速やかに医師の診療を受けて下さい。** 手当てが遅れると生命にかかわるおそれがあります。③ **飲み込んだ場合は、直ちに口をすすぎ、多量の水、牛乳や生卵等を飲ませ、無理に吐かせずに、速やかに医師の診療を受けて下さい。** ④ **皮膚に付着した場合は、直ちに多量の水で十分に洗い流して下さい。** 手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。異常が残る場合は、皮膚科医の診療を受けて下さい。⑤ **使用中、目にしみたり、せき込んだり、気分が悪くなった時は使用をやめてその場から離れ、手洗い・洗眼・うがい等をして下さい。** ※万一、身体に異常が起きた場合は、本品を所持し医師に相談して下さい。

【お問い合わせ先】

丸石製薬株式会社 学術情報グループ
大阪市鶴見区今津中2-4-2 TEL.0120-014-561
製造番号:底面上段 使用期限:底面下段



スプレー:PP、PE
ボトル:PE